

## Informācija par produktu

Virsmu dezinfekcijas līdzeklis

# schülke →



Lietošanai gatavs alkoholu saturošs ātras dezinfekcijas šķīdums, nesatur aldehīdus

## mikroloid® AF šķīdums

### Mūsu plusi:

- lietošanai gatavs šķīdums
- ļoti plaša biocidāla iedarbība īsākajā laika posmā
- labas mitrinošās īpašības
- ātri nožūst, neatstājot traipus

### Pielietošana

Alkoholu saturošs līdzeklis medicīnisku ierīču ātrai dezinfekcijai [CE 0297] vietās ar paaugstinātu inficēšanās risku un vietās, kur nepieciešams īss kontakta laiks, piemēram,

- Pacientu ārstēšanas iekārtām
- Apskates kušetēm
- Operācijas galdiem un blakus darba virsmām
- Medicīnisko ierīču virsmām

### Mikrobioloģiskā efektivitāte

- Baktērijas (tai skaitā TB) • Sēnītes • Hepatīta B vīrusi
- HIV • HCV • Adenovīrusi • Rotavīrusi • Papovavīrusi
- Poliovīrusi

### Ekspozīcijas laiks

Efektīvs pret	Ekspozīcijas laiks
Baktērijas, sēnītes (C.albicans) (saskaņā ar DGHM vadlīnijām pie īsām ekspozīcijas laikiem)	1 min.
MRSA	1 min.
TB	1 min.
Pilnībā virucidāls*	30 min.
Enkapsulētiem vīrusiem (tai skaitā HIV, HBV, HCV)	30 sek.
Adenovīrusi (2. tips)	2 min.
Norovīrusi**	1 min.
Rotavīrusi	30 sek.
Poliovīrusi	30 min.
Papova SV 40	15 min.
Vaccinia	30 sek.

### VAH/DGHM-List/Sertifikāts

Virsmu dezinfekcija slimnīcās un medicīnas prakses vietās

ÖGHMP ekspertīze No. 95/8

\* Saskaņā ar Roberta Koha Institūta vadlīnijām – German Federal Health Gazette 01/2004

\*\* Peles Nora vīruss saskaņā ar EN 14 476

# mikrozid® AF šķīdums

## Informācija par produktu

Sastāvs: 100 g produkta satur: 25 g etanols (94 %), 35 g propan-1-ols

### Ķīmiskie/fiziskie dati

Izskats:	dzidrs, bezkrāsas šķīdums
Blīvums (pie 20 °C):	ap 0,89 g/cm <sup>3</sup>
Viskozitāte (DIN 53 211):	< 15 sek.
Termiskā stabilitāte:	no -5 °C līdz +40 °C
pH:	ap 6,0
Uzliesmošanas punkts (DIN 51 755):	27 °C

## Lietošanas instrukcija

mikrozid® AF liquid ir lietošanai gatavs šķīdums. Uznesiet neatšķaidītu mikrozid® AF šķīdumu uz priekšmetiem, virsmām un atstājiet to iedarboties. Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā sasalpinātas. Maksimālā deva 50ml/m<sup>2</sup>. Nepieciešamības gadījumā noslaucīt ar vienreizlietojamu salveti (no nekrāsota materiāla).

## Marķēšana atbilstoši ES Direktīvām

Xi:	Kairinošs
R10:	Uzliesmojošs
R41:	Nopietnu bojājumu draudi acīm
R67:	Tvaiki var radīt miegainību un reiboni
S23:	Izvairīties no aerosolu ieelpošanas
S26:	Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību
S39:	Valkāt acu vai sejas aizsargu
S51	Izmantot tikai labi vēdināmās telpās

## Īpaši norādījumi

Ieteicams lietot gumijas (piem., butila) cimds. Mikrozyd AF liquid uzrāda īpaši labu saderību ar metāliem un plastmasu (izņemot akrila stiklu un pret alkoholu jūtīgu politūru).

## Aksesuāri / Dozēšanas palīgīdzekļi

Konteineru izmēri	Vienības Nr.
1 L izsmidzināšanas sūknis	180 112
10 L kannas krāns	135 501
Palīgierīce 10L kannas atveršanai	135 810
Piltuve	117 901

Lai iegūtu detalizētu informāciju par mūsu dozēšanas iekārtām, lūdzu pieprasiet vispārīgu pārskatu par higiēnas tehnoloģijām.

## Vides informācija

Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, uzlabotā, drošā un videi draudzīgā ražošanas procesa ceļā, tajā pašā laikā saglabājot augstus kvalitātes standartus.

## Ekspertu viedokļi un pārēja informācija

Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un pārskatus par Mikrozyd® AF šķīdumu: [www.schuelke.lv](http://www.schuelke.lv)

## Jūsu individuālajiem jautājumiem:

Klientu apkalpošanas centrs  
Tāl. 67795240  
E-pasts: [schuelke@interlux.lv](mailto:schuelke@interlux.lv)  
Web: [www.schuelke.lv](http://www.schuelke.lv)



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke&Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0 1070 Wien, Austria  
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke&Mayr Ges.m.b.H  
Seidengasse 9  
Dreilini, Stopiču nov., LV2130  
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0  
Tāl. +371 67795240  
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60  
[office@schuelke.at](mailto:office@schuelke.at)

Interlux, SIA  
"Jaunbūmaņi", 2.korp.  
Dreilini, Stopiču nov., LV2130  
Tāl. +371 67795240  
Fakss +371 67795240  
[schuelke@interlux.lv](mailto:schuelke@interlux.lv)  
[www.schuelke.lv](http://www.schuelke.lv)