

Stabimed® fresh Instrumentu dezinfekcijas līdzeklis

Nesatur aldehīdus.

Kodīgs.

Iedarbīgs pret baktērijām, TbB, sēnītēm, apvalkotiem vīrusiem (iesk. HCV, HBV, HIV), neapvalkotiem vīrusiem: Adeno vīrusiem, poliomavīrusiem.

Aktīvs 5 minūtēs.

Sastāvs: 100g šķīduma satur: Kokopropilēna diamīnu 20,0g, virsmas aktīvās vielas, šķīdinātāji, mazgājošie aktivatori, korozijas inhibitori, aromātiskās substances, krāsviela, palīgvielas.

Satur: Laurilpropilēna ditamīnu, nejonu virsmas aktīvās vielas.

Bīstamība. Viegli uzliesmojošs. Kaitīgs norijot. Rada nopietnu apdegumu. JA IEKĻUVIS ACĪS: nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un meklēt medicīnisko palīdzību. Lietot aizsargapģērbu, cimds un acu /sejas aizsargmasku. Ja noticis negadījums un jūtaties slikti, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību (ja iespējams parādīt marķējumu).

Lietošana: Manuāla

Stabimed dezinfekcijas līdzeklis paredzēts ķirurģisko instrumentu, endoskopu, laboratorijas un anestēzijas iekārtu dezinficēšanai un tīrīšanai. Piemērots tīrīšanai ar ultraskaņu.

Iedarbības laiks/Lietot atšķaidītu	5 min	15 min	30 min	60 min
Instrumentu dezinfekcija (netīra vide) -ieskaitot apvalkotus vīrusus	1,0% <u>10ml/L</u>	0,5% <u>5ml/L</u>	-	-
TbB (M.terrae, netīra vide)	-	2,0% <u>20ml/L</u>	0,5% <u>5ml/L</u>	-
Poliomavīruss	-	-	-	2,0% <u>20ml/L</u>
Adenovīruss	-	-	-	4,0% <u>40ml/L</u>

Informācija: Pēc dezinficēšanas instrumentus noskalot viscaur ar ūdeni un turpināt kā prasīts. Jebkuru pārpalikumu noslaucīt ar spirtā iemērcētu auduma salveti. Nav saderīgs ar aldehīdus saturošiem produktiem.

Ražotājs:

B.Braun Medical AG
CH-6204 Sempach
Šveice

Izplatītājs:

B.Braun Medical SIA
Ūdeļu iela 16, Rīga LV-1064
Tel. 67819549
Fakss: 67819547